

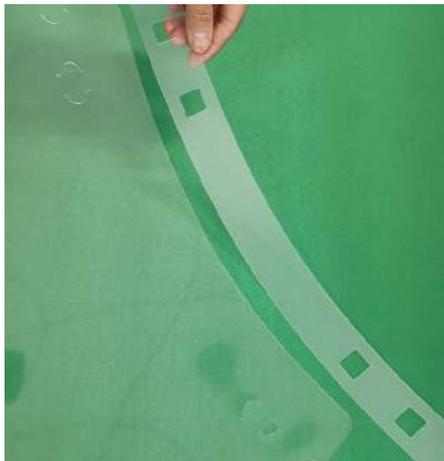



透明フェイスシールド 組み立て方

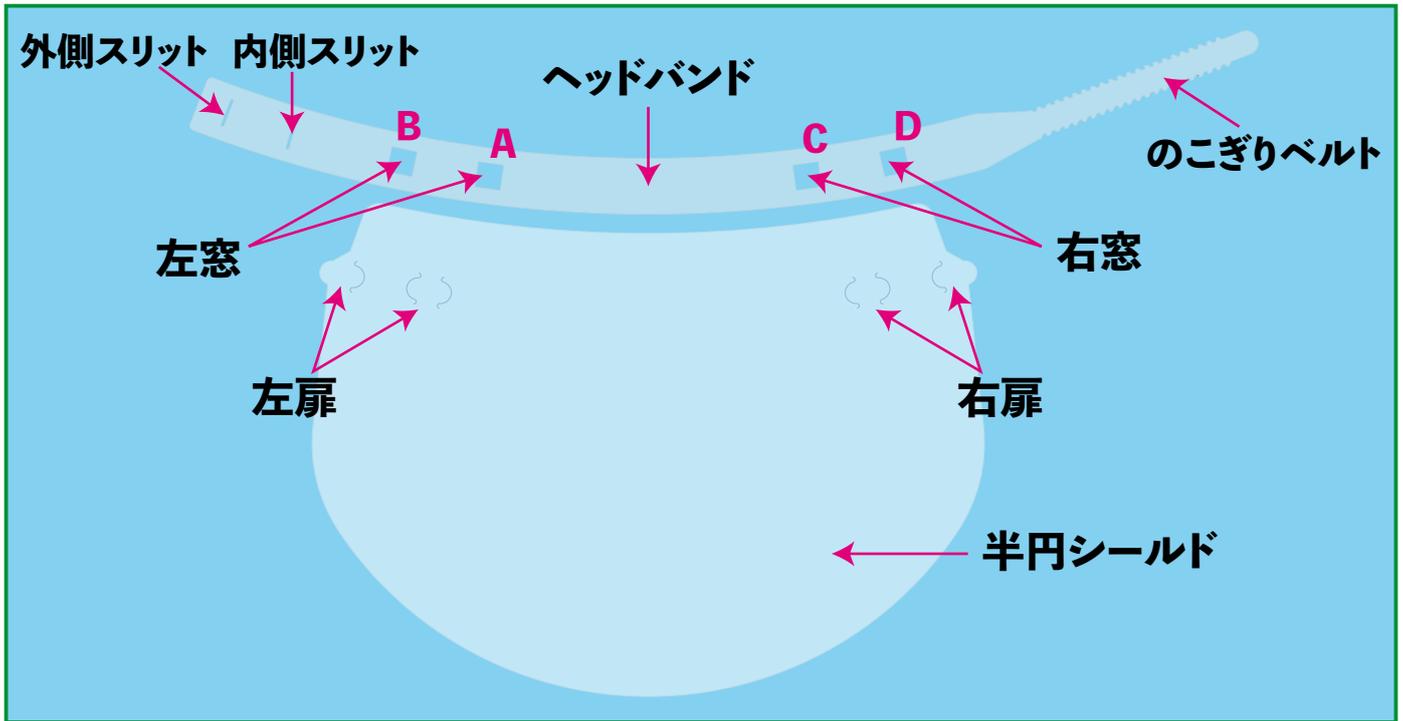


①ヘッドバンドを半円シールドの直線側に重ねます。

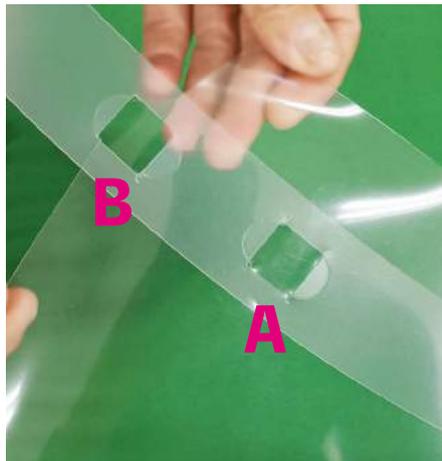

②ヘッドバンドの左窓と半円シールドの左扉を組み合わせます。(A→Bの順に)

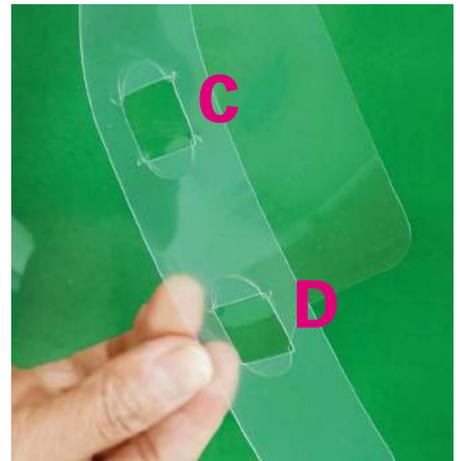


③右窓と右扉も同じように組み合わせます。(C→Dの順に)

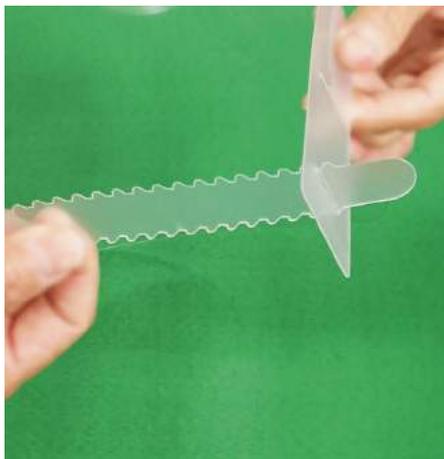


④のこぎりベルトの先端を外側スリットに通し、自分の頭にフィットするサイズまで差し込みます。



⑤調整が終わったら、のこぎりベルトの先端を内側スリットに差し込みます。

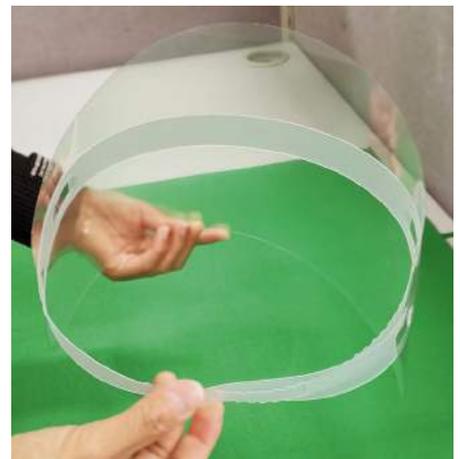

⑥ベルトのサイズ調整は何度でもできます。

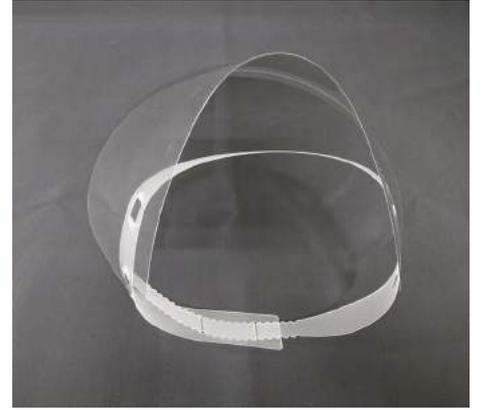

- 本製品は飛沫、油跳ね、埃などを防ぐ効果があります。
- 医療器具ではありませんので、ウイルス感染を完全に防ぐことはできません。
- マスクと併用してお使いいただくことをおすすめいたします。
- 複数人での使いまわしはしないでください。